

ぴったりフィット!
救急絆創膏

わん曲形状



わん曲形状

ベンザルコニウム塩化物配合

カールバン
W

むれない

水に強い

フィットする

1サイズ
24枚入

第3類医薬品

わん曲形状

ぴったりフィット!



使用期限

製造番号

救急絆創膏
第3類医薬品

カールバンW
1サイズ
24枚入

カールバンW

第3類医薬品

△使用上の注意

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

効能又は効果

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒・被覆

用法及び用量

中央のパッドに触れないようにして剥離紙を取り除き、パッドが傷口に当たるように貼ってください。

(用法及び用量に関連する注意)

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 患部を清潔にし、ガーゼ部分を汚さないように注意して使用してください。
- (4) 粘着面を患部に貼らないでください。
- (5) 皮膚の弱い人は絆創膏部分を同じところに続けて貼らないでください。
- (6) 貼る際は、引っ張らないで軽く圧着してください。
- (7) 患部に石けんが残っていますと殺菌消毒効果が低下しますので、石けんを十分水で洗い流した後、水分をよく拭き取ってから使用してください。

成分及び分量

パッド100g中 ベンザルコニウム塩化物 100mg
添加物としてマクロゴール、メチルセルロース、ガーゼを含有します。

(保管及び取扱い上の注意)

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社 お客様相談窓口
電話:076-479-1313
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元



大協薬品工業株式会社
富山市水橋富等173



紙:箱

外装フィルム

内容 19mm×70mm
24枚入 ¥500+税

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai/camp/index.html>
電話:0120-149-931 (フリーダイヤル)



T11